


Інструкція користувача

QuikVue® пристосування для створення фотозображень очей
Модель: VPA-100

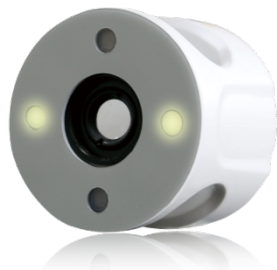

Дякуємо Вам, що придбали **цифрове пристосування до смартфона для створення фотозображень очей** QuikVue® виробництва Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.

QuikVue® можна дуже легко підключити до смартфона і використовувати для створення фото- та відеозображень, переходячи між різними LED-режимами.

Характеристики

Збільшення	15X
Підсвітка	Біла (2 рівні яскравості), Кобальтова синя
Час роботи	6 годин
Живлення	Підзарядна літій-іонна батарея
Підзарядка	Мікро USB кабель

Комплектація



QuikVue® цифрове пристосування



Мікро USB кабель




Сумочка для зберігання



Інструкція користувача

Технічні компоненти QuikVue®

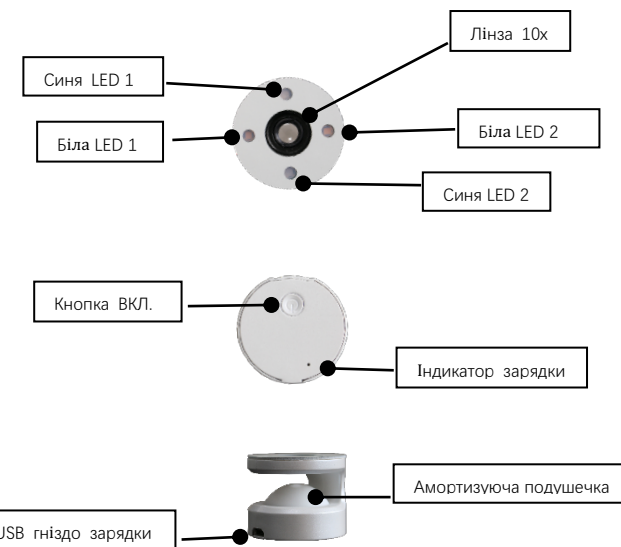

Рекомендації з встановлення

QuikVue® is підходить для використання зі смартфонами, у яких камери розташовані не посередині телефону.

Будь-ласка, прикріпіть QuikVue® до смартфона за допомогою [амортизуючої подушечки](#). Амортизуюча подушечка дозволяє міцно прикріпити QuikVue® до смартфона. Будь-ласка, переконайтеся, що мікро-об'єктив QuikVue® is знаходиться на одній лінії з цифровою камерою смартфона. Користувач може перевірити попереднє зображення на екрані смартфона, щоб переконатися в правильності положення.



(a)



(б)



(в)

Переключення LED-підсвітки

Будь-ласка, натисніть на кнопку ВКЛ. для переходу між різними режимами LED підсвітки.

При першому натисканні включиться біла LED-підсвітка.



Після другого натискання біла LED-підсвітка стане більш яскравою.



Після третього натискання біла LED-підсвітка вимкнеться і включиться синя LED-підсвітка.



Після четвертого натискання, LED-підсвітка буде повністю вимкнена.

Рекомендації щодо зарядки батареї

Якщо LED-підсвітка стане тьмяною, будь-ласка, скористайтесь мікро USB кабелем для підзарядки QuikVue® пристосування. Під час зарядження світловий індикатор буде мати червоний колір, позначаючи статус зарядки. Після завершення зарядки, світловий індикатор набуде зеленого кольору. Повна зарядка займає близько 60 хвилин. Час роботи QuikVue® після повної зарядки становить 6 годин.

Рекомендації з очищення

Будь-ласка, очищуйте поверхню QuikVue® за допомогою м'якої тканини, уникаючи при цьому контакту з об'єктивом, LED-лампою та гніздом живлення. Якщо необхідно, будь-ласка очищуйте об'єктив, LED-лампу та гніздо живлення за допомогою сухої надтонкої мікрофібрової тканини.

Якщо під час використання QuikVue® у Вас виникли будь-які проблеми, будь-ласка, не розбирайте пристосування самостійно. Будь-ласка, зв'яжіться з представником QuikVue®, у якого було придбано пристосування, або для надання допомоги зв'яжіться безпосередньо з Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.



Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.



Адреса: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Тел./Факс: +86 21 349 736 59 Ел.пошта: info@visuscience.com
Інтернет-сайт: www.visuscience.com

© 2019 VisuScience. Всі права захищено.

V201908